

---

フォナック

デジタルワイヤレス補聴援助システム『ロジャー』

基本的な使い方


☑ ロジャー パスアラウンド マイク






## ロジャー パスアラウンド マイクの使い方

マイクロホンを充電する

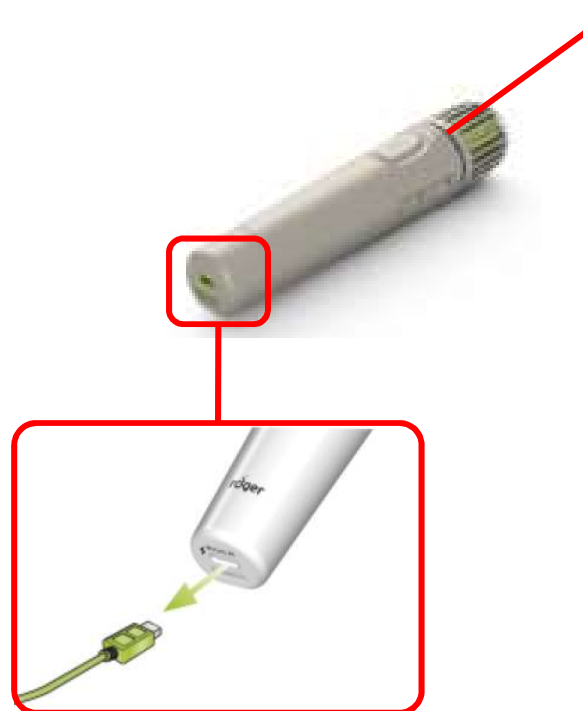□ACアダプタのマイクロUSBプラグの向きを確認して、本体のマイクロUSBソケットにまっすぐ差し込みます。



LEDランプ

|  |            |
|--|------------|
|    | 充電中        |
|   | フル充電(約2時間) |
|  | 再充電必要      |

---

## ロジャー パスアラウンド マイクの使い方

あらかじめロジャー タッチスクリーン マイクでネットワークモードを選択しておきます。

□ 複数台のロジャーマイクロホンを使用するとき、2台のマイクロホンから同時に音声信号を送信したり、優先順位をつけたりすることができます。

① ミキシング： 親機と1台の子機の何れか1台が同時に音声を送信することができます。

② 優先順位あり： [親機](最初の1台)のマイクロホンが常に優先されます。[子機](2台目以降)のマイクロホンは親機が話しているときは音声を送れません。

③ 優先順位なし： [親機]、[子機]関係なく早いもの順で音声を送信します。

□ [各種設定]の画面で[ネットワークモード]をタップします。

□ ①、②、③の何れかのモードをタップします。

---

## ロジャー パスアラウンド マイクの使い方

### 電源を入れる

- インジケータが緑色に点滅するまで電源ボタンを押し続けます。  
ディスプレイが点灯します。



### 電源を切る

- インジケータが緑色に点滅するまで電源ボタンを押し続けます。

## ロジャー パスアラウンド マイクの使い方

一緒に使用する受信機を接続する

- 本製品から10 cm以内の距離で、ロジャー タッチスクリーン マイクから機器の接続を行います。
- 本製品がネットワークに追加されます。



- 本製品を複数台使用する場合は、一台ずつ接続してください。
- 同じネットワークで使用できる

## ロジャー パスアラウンド マイクの使い方


### LED

- 集音中はLEDが緑色で点灯します。

集音中



- 卓上に置くと自動でミュート(消音)になりLEDが赤色で点灯します。

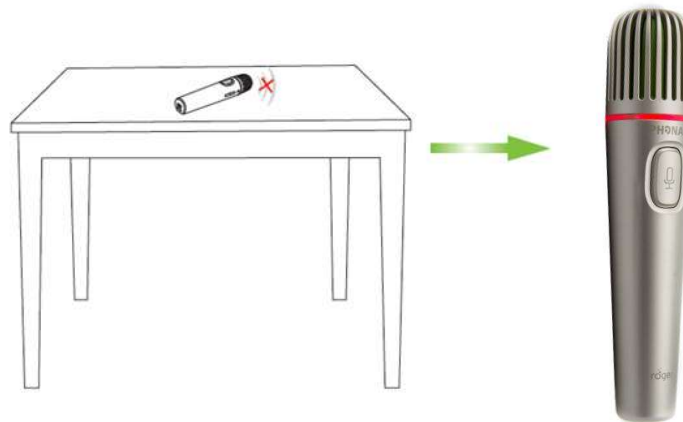

---

## ロジャー パスアラウンド マイクの使い方

### スタンド利用時

- スタンド利用時は自動で集音力をアップします。(集音距離30～90cm)
- 専用スタンドでなくても固定されると集音力が上がります。

