

音声文字化アプリで活用する ロジャー ネックループ

接続と使用方法

ロジャー ネックループは、PC やタブレット、スマートフォンに USB 端子を用いて接続し、市販の音声文字化アプリなどを使用して、ロジャーの音声を活字に変換することができます。

準備

1. ロジャー ネックループと、ロジャー マイクロホンとはあらかじめ充電しておきます。
2. ロジャー ネックループと、ロジャー マイクロホンが接続されていることを確認します。MTN（マルチ・トーカー・ネットワーク）も利用可能です。詳しくは取扱説明書をご参照ください。
3. PC やタブレット、スマートフォンに音声文字化アプリ、もしくはリアルタイム文字変換やディクテーション機能をもつソフトウェアをインストールしてください。

① USB-A 端子を搭載した PC との接続

用意するもの：

USB-C ケーブル（本体付属品）




1. USB-C ケーブルを用い、ロジャー ネックループと PC を接続します。
2. ロジャー ネックループの電源をオンにします。
3. PC のサウンド設定で、入力デバイスとしてロジャー ネックループ (Roger Neckloop) を選択してください。



4. PC 上で音声文字化に対応したソフトウェアを実行します。
(例：Microsoft Word の「ディクテーション」機能)



5. ロジャー マイクロホンに話した内容が、ソフトウェアに（この場合 Word の文章として）書き起こされます。

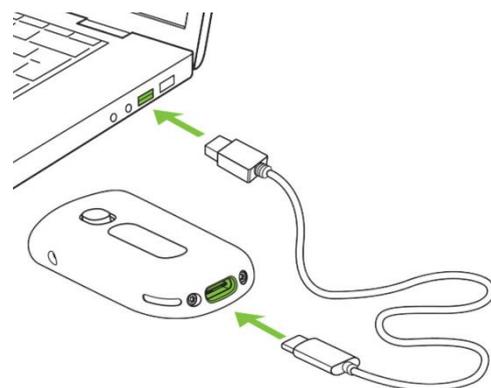

② USB-C 端子を搭載した PC・タブレットまたはスマートフォンとの接続

用意するもの：

USB-C to C ケーブル（別売もしくはタブレット・スマートフォン付属品）



もしくは USB-C ケーブル（本体付属品）と USB-A to C 変換アダプタ（別売）



1. 上記の何れかの方法で、端末とロジャー ネックループを接続します。
2. ロジャー ネックループをオンにします。
3. メモアプリ（iOS）や Google 音声文字変換（Android）、もしくは UD トークなど利用可能な音声文字化アプリを実行します。
4. 入力デバイスの切り替えが必要な場合はロジャー ネックループに変更します。
5. ロジャー マイクロホンに話した内容が、アプリによって書き起こされます。


③ Lightning 端子を搭載したタブレット・スマートフォンとの接続

用意するもの：

USB-C ケーブル（本体付属品）

Lightning-USB3 カメラアダプタ（別売）

Lightning 充電ケーブルと AC アダプタ（タブレット・スマートフォン付属品）

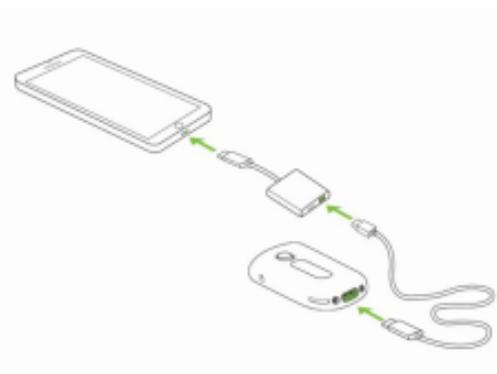

1. Lightning-USB3 カメラアダプタをタブレット・スマートフォンに接続します。
2. Lightning-USB3 カメラアダプタの USB 端子に、ロジャー ネックループ 付属の USB-C ケーブルを接続します。
また、その横にある Lightning 端子に Lightning 充電ケーブルと AC アダプタを接続します（電源が必要です）。
3. ロジャー ネックループをオンにします。
4. メモアプリ（iOS）や UD トークなど、利用可能な音声文字化アプリを実行します。
5. 入力デバイスの切り替えが必要な場合はロジャー ネックループに変更します。
6. ロジャー マイクロホンに話した内容が、アプリによって書き起こされます。

Lightning-USB3 カメラアダプタ（MK0W2AM/A）と Lightning-USB カメラアダプタ（MD821AM/A） は異なる製品です。充電端子のない Lightning-USB カメラアダプタでは正しく動作しません。

ただし、すでに Lightning-USB カメラアダプタをお持ちの方への情報として、USB-C ケーブルと Lightning-USB カメラアダプタの間にセルフパワー方式の USB ハブを接続し、電源が供給された状態であれば動作する可能性があります。

< 注意点 >

- ・ USB 接続されたロジャー ネックループからの音声がアプリで使用できるかどうかは、端末やアプリの仕様によって異なります。
- ・ 本書に記載の情報は、その動作を保証するものではありません。ロジャー製品および他社製ソフトウェアをご購入の際には、お手持ちの機器において十分な動作確認を行っていただきますようお願いいたします。