

フォナック

デジタルワイヤレス補聴援助システム “ロジャー”

基本的な使い方


☑ ロジャー タッチスクリーン マイク



ロジャー タッチスクリーン マイクの使い方

1. マイクロホン进行充電する

- 付属されているACアダプタのマイクロUSBプラグの向きを確認して、本体のマイクロUSBソケットにまっすぐ差し込みます。

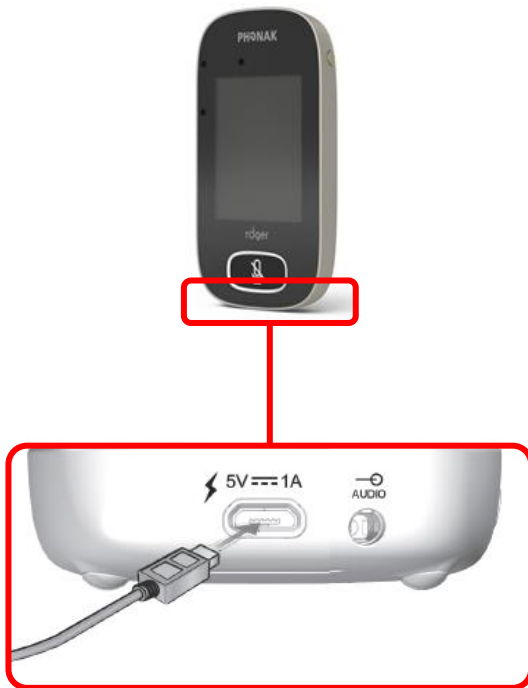


	充電中
	フル充電(約2時間)
	再充電必要 ※ 電池残量が少なくなると充電マークが赤色に変わり、本体上部のインジケータが赤く二重点滅します。

ロジャー タッチスクリーン マイクの使い方

2. マイクロホン装着する


- ❑ 付属されているネックストラップのクリップ部分を図のように本体裏面上部の穴に入れ、カチッと音がするまでしっかりと差し込みます。
- ❑ ネックストラップの長さを図のように適宜調節します。(口元から約20cm)

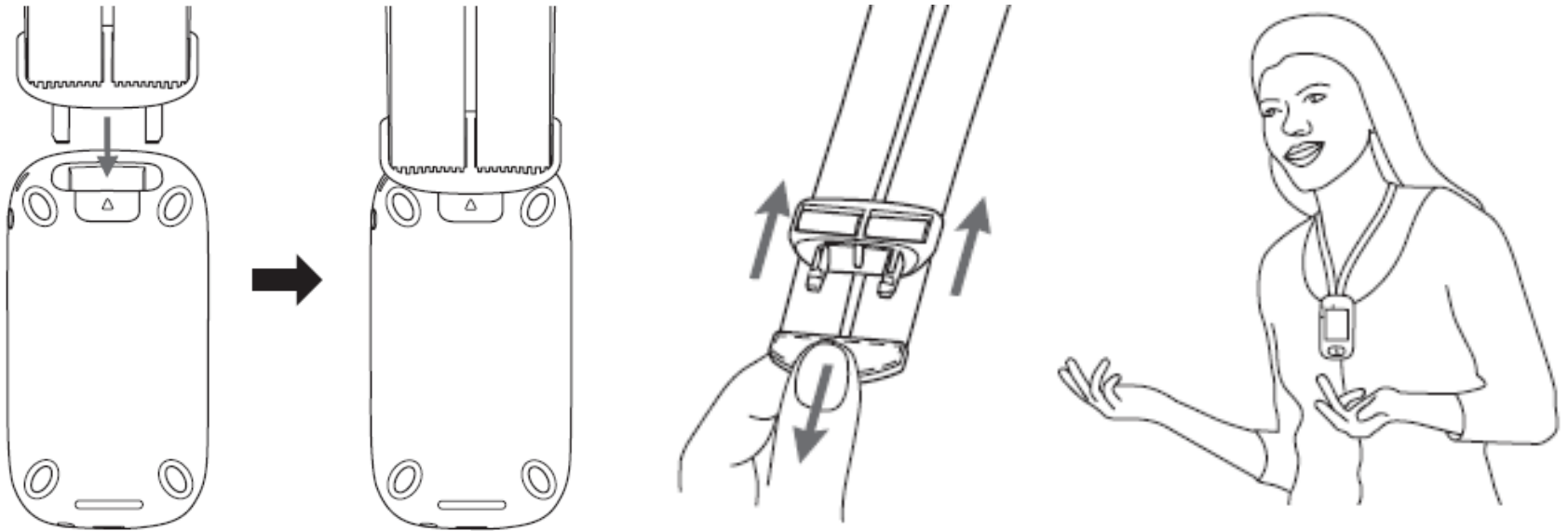

ロジャー タッチスクリーン マイクの使い方

2. マイクロホンを装着する(ネックストラップの取り外し)

- ネックストラップを取り外すときは、本体裏面のネックストラップ取り外しボタンを押しながら取り外します。

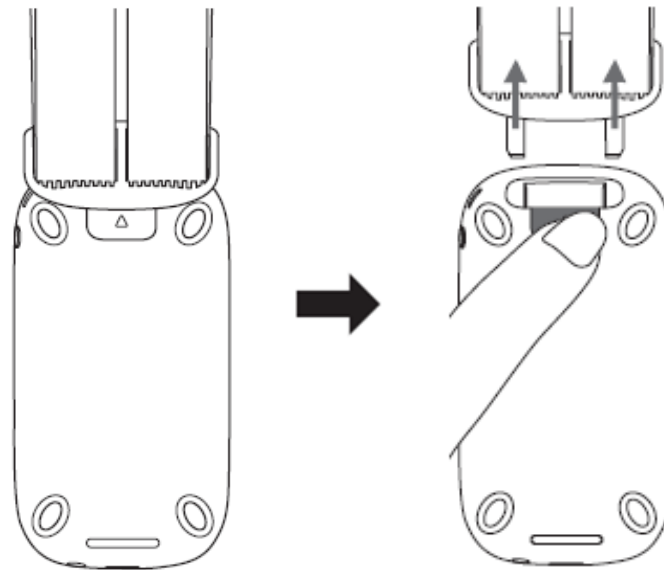

ロジャー タッチスクリーン マイクの使い方

3. 電源を入れる

- インジケータが緑色に点滅するまで電源ボタンを押し続けます。ディスプレイが点灯します。



電源を切る

- ポップアップウィンドウが表示されるまで電源ボタンを押し続けます。
-  (Yes)をタップします。

スリープ/スリープ解除


- 電源ボタンを押して、スリープ/スリープ解除を切り替えます。

ロジャー タッチスクリーン マイクの使い方

4. 一緒に使用するロジャー受信機を接続する

一緒に使用したいロジャー受信機を、本製品と同じネットワークに接続します。

- ❑ （機器の接続）をタップします。
ロジャー受信機がネットワークに接続されます。
- ❑ ロジャー受信機がネットワークに接続されると、
補聴器からビープ音が聞こえます。
- ❑ 受信機は1台ずつネットワークに接続します。
- ❑ 受信機のネットワークへの接続は1回のみです。ネットワークに接続した
受信機は、電源をオフにしてもネットワークに接続され続けます。

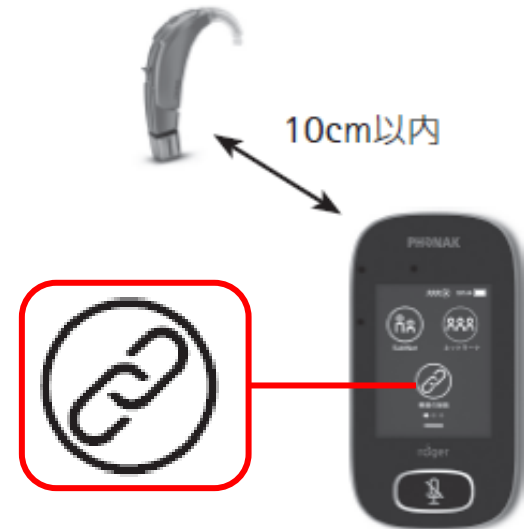


ロジャー タッチスクリーン マイクの使い方

5. ミュート(消音)を活用する

聞き手(受信機利用者)に音声を聞かせたくないときはミュートにしてください。ミュートにすると本製品のマイクロホンを一時的に無効にすることができます。

- ❑ ミュートボタンを押します。
- ❑ ミュート中はミュートボタン周囲のインジケータが赤く点滅します。
- ❑ ミュート解除はミュートボタンをもう一度押します。

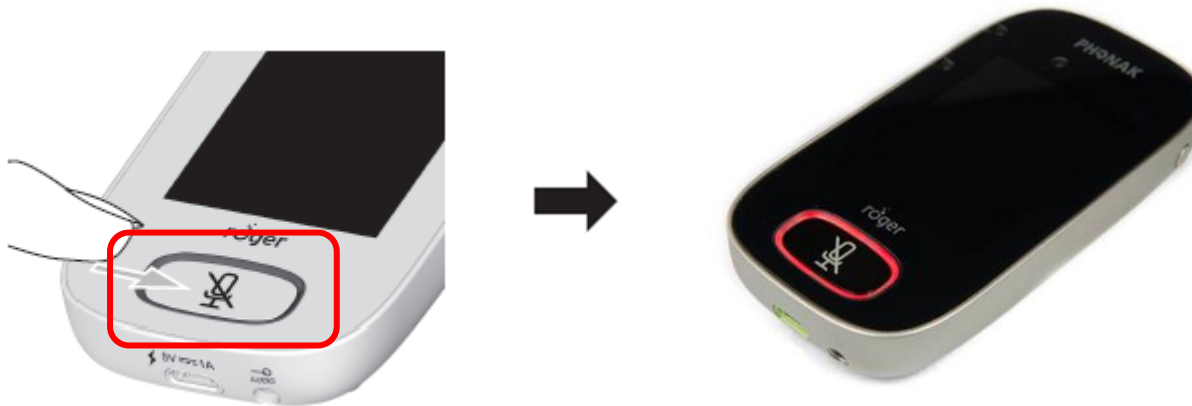

ロジャー タッチスクリーン マイクの使い方

6. 小グループモードを活用する

2～5名の少人数のグループ内で、話し手の声を聞くときに使用します。

- ❑ 本製品をテーブルの中央に置きます。
- ❑ マイクロホンが話し手の声を検知し、集音する(指向性マイクの)方向を自動的に話している人の方向に向け集音します。

