

『ウォータープルーフ補聴器』の

オーディオ ライフと IP68 補聴器って何が違うの？



IP68 補聴器とは？

真水を使い、IP 規格に則り定められた試験基準をパスした補聴器。

真水であれば濡れても乾燥させれば、再び音が出力され直接的な故障にはつながらない。



防塵テスト
8 時間



耐水テスト
水深 1m、1 時間

オーディオ ライフのウォータープルーフとは？

真水を使った IP68 だけでなく、さらに、フォナック独自の厳しい条件をクリアしたウォータープルーフ*充電式補聴器。


真水・塩水・塩素水・汗で濡れてもそのまま使用可能。補聴器に水が染み入らないようコーティングやシーリングでハウジング強化。



試験動画は QR へ



- ・塩水（海を想定）
- ・塩素水（プールを想定）

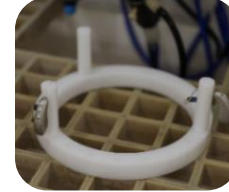

試験動画は QR へ



- ・汗合成スプレー（汗を想定）

* 水深最大 50 cm

詳しい試験内容: <https://onl.tw/ALTsGtS>

こんな場所や状況で安心して使えます♪

もっと自分らしく、あなたの“ライフ”を楽しみましょう。

場所・状況	突然の雨	突然の大雨	海水浴/ビーチ	プール/プール教室	ジム/ワークアウト
オーディオ ライフ	○	○	○	○	○
IP68 補聴器	○	×	×	×	×
おすすめポイント♪	雨や水遊びといった生活防水でなら使用可能♪	突然のどしゃ降りでも、補聴器を外し忘れてお風呂やシャワーに入ってしまった場合も安心♪	海を想定した塩水試験を行っているから海に行っても安心♪ 海の音を聞きながら、会話も楽しめよう。	プールを想定した塩素水試験を行っているからプールも安心♪ プールや温泉で家族や友達と会話を楽しめよう。	汗を想定した汗試験をクリアしたスウェットプルーフだから安心♪ 汗を気にせず好きなことを全力で楽しめよう。
でも注意してほしいこと	注意： - 水で濡れた後は水分をしっかりと拭き取り乾燥させる。 - 電池式補聴器は水分を拭き取ってから電池ホルダーを開けること。	注意： - 水で濡れた後は水分を拭き取ってから充電する。 - シャンプーや石鹸の使用は避ける。 - 強い水圧は避ける。 - 使用温度は 5-40°C。	注意： - 水深最大 50cm まで。 - 水中で補聴器を失くさないよう注意を払う。 - 強い水圧は避ける。 - 使用温度は 5-40°C。	注意： - 水深最大 50cm まで。 - 水中で補聴器を失くさないよう注意を払う。 - 強い水圧は避ける。 - 使用温度は 5-40°C。 - 温泉に潜るようなことは避ける。	注意： - 汗で濡れた後は汗を拭き取ってから充電する。