

ウォータープルーフ補聴器の 洗い方と注意点



洗面器の中で
水洗いする

×
せっけん類は
使わない

布でしっかり
ふき取る

×
蛇口から出た水で
直接洗わない



ウォータープルーフ補聴器を毎日洗う必要はありませんが、次のような場合には安心して洗っていただけます。

- ✓ 運動中に汗をかいた
- ✓ 畑仕事中に土がついた
- ✓ 雨でずぶ濡れになった

▶ 洗い方は動画でチェック！



水や汗にだんぜん強いから、毎日が安心。

フォナック オーデオ ルミティ ライフ

プールでも温泉でも使えるウォータープルーフ*充電式補聴器“ライフ”。
厳しい性能テストで証明された防水性*と防汗性に加え、会話中のことばの理解を向上するよう設計された独自の機能「フォナック スマートスピーチ テクノロジー」搭載により、日常の安心と会話の楽しみを頼もしくサポートします。

* 水深最大 50 cmまで

