



携帯電話との接続方法



携帯電話とつないでハンズフリー通話や音声ストリーミングを楽しめます。

※ 機種によってはマイフォナック アプリを使用してBluetoothペアリングを完結させることができます。

以下はアプリを使用せず、ハンズフリー通話や音声ストリーミングのBluetoothペアリングをする場合の方法になります。

iPhoneの場合

※機種によって画面表示が異なります。


Android™の場合

※機種によって画面表示が異なります。

1


電池式補聴器の場合

電池ホルダーを開け補聴器の電源をOFFにする。

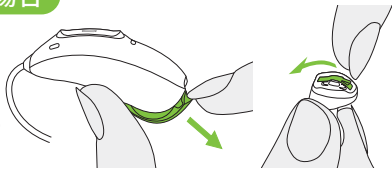

充電式補聴器の場合

多機能ボタンの下部を約3秒間長押し、またはプログラムスイッチを約4秒間長押しして補聴器の電源をOFF (短く1回赤色に点滅) にする。

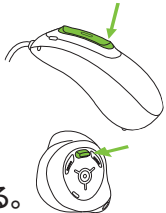

2

画面にある「設定」アイコンをタップする。



3


「Bluetooth」をタップし、オンになっていることを確認する。



4


電池式補聴器の場合

電池ホルダーを閉め補聴器の電源をONにする。

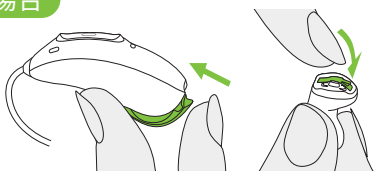

充電式補聴器の場合

多機能ボタンの下部を約3秒間長押し、またはプログラムスイッチを約4秒間長押しして補聴器の電源をON (短く8回緑色に点滅) にする。

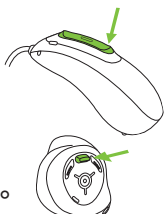

5

「右-Phonak 補聴器*」をタップする。

※両耳装用の場合でも片耳しか表示されません。

*補聴器販売店で他の名称に変更されている場合があります。



6


「接続済み」となれば完了。



1


電池式補聴器の場合

電池ホルダーを開け補聴器の電源をOFFにする。

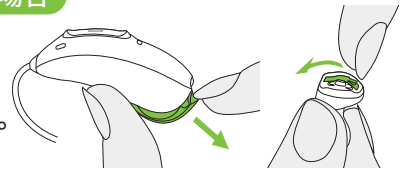

充電式補聴器の場合

多機能ボタンの下部を約3秒間長押し、またはプログラムスイッチを約4秒間長押しして補聴器の電源をOFF (短く1回赤色に点滅) にする。

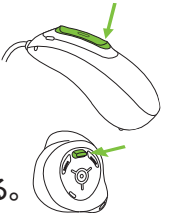

2

画面にある「設定」アイコンをタップする。




3

「接続設定」をタップする。



4


「新しいデバイスとペア設定」をタップする。

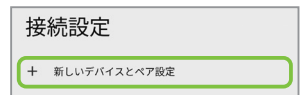

5


電池式補聴器の場合

電池ホルダーを閉め補聴器の電源をONにする。

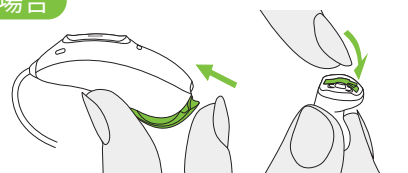

充電式補聴器の場合

多機能ボタンの下部を約3秒間長押し、またはプログラムスイッチを約4秒間長押しして補聴器の電源をON (短く8回緑色に点滅) にする。

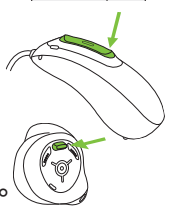


6

「右-Phonak 補聴器*」をタップし、「ペア設定する」をタップする。

※両耳装用の場合でも片耳しか表示されません。

*補聴器販売店で他の名称に変更されている場合があります。

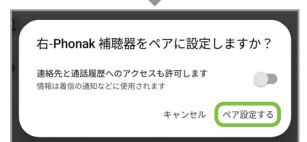

7

「有効」となれば完了。





マイフォナック アプリとの接続方法

アプリで補聴器の音量調節やプログラム変更等が行えます。

1

App StoreまたはGoogle PlayでmyPhonak(マイフォナックアプリ)を検索しダウンロードする。

App Store



Google Play



2

アプリを立ち上げて画面の表示に沿って操作し、「補聴器のペアリング」をタップする。

3

画面の案内に沿って補聴器の電源を入れ直す。

4

両耳装用の場合は、左右両方の補聴器が表示されてから「ペアリング」をタップする。

5

「ペアリングの要求」または「ペア設定リクエスト」をタップしてペアリングを進める。

6

「ペアリング完了」が表示されたら補聴器とマイフォナックアプリとの接続が完了。

補聴器とアプリの接続ができないときやBluetooth接続が不安定なときに行うこと

(片側しか接続できない場合や音声途切れるときなどの再接続を含みます)

はじめにご確認ください

- 補聴器の電源を入れ直してください。
- スマートフォンの設定の「Bluetooth」または「接続設定」の画面を確認し、補聴器が接続されていない場合は、「右-Phonak 補聴器(補聴器販売店で他の名称に変更されている場合があります)」または「ペア設定する」をタップしてください。

上記の操作をしても、アプリやBluetooth接続が不安定なときは **STEP 1** へ

STEP 1

①アプリのタスクを終了する。

タスクの終了(例:上へスワイプ)
※機種によって操作は異なります。

②スマートフォンOSとアプリの最新アップデートを確認する。

③スマートフォン、アプリを再起動する。



※画面はiPhoneの場合の表示です。

再接続できなければ **STEP 2** へ

STEP 2

①アプリ内で補聴器の接続を解除する。

機器 ▶ 製品情報 ▶ 機器を削除

②スマートフォンとBluetooth接続の対象機器接続を解除する。

電話/ストリーミング
例:『右-Phonak 補聴器』
アプリ
例:『LE_右-Phonak』



※画面はiPhoneの場合の表示です。

③補聴器とスマートフォンを再接続する。

POINT

- 『右-Phonak 補聴器』を『○○の補聴器』などに変更して判別しやすくしましょう。
- 他デバイス(テレビ、モニター、パソコンなど)や他補聴器から離しましょう。

Android™(アンドロイド)は Google LLCの商標です。Bluetooth®およびそのロゴはBluetooth SIG, Inc. の商標です。

iPhone、iPad、iPod touchは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。