

(スマートフォンのBluetooth設定画面からはペアリング操作を行う必要はありません)

1 スマートフォンのBluetoothがONになっていることを確認



2 アプリを起動しペアリング開始

ワンステップペアリングは音量など操作するアプリとの接続と、ストリーミング接続を一度に行うことが可能です。

3 充電器から補聴器を外すか多機能ボタン/プログラムスイッチを3秒/4秒長押しして補聴器を起動

補聴器は起動後、3分間ペアリングモードになります。

4 左右の補聴器が表示されたら、ペアリングアイコンをタップ



※補聴器の形状を問わずアプリ画面は耳かけ型補聴器の画像です。

5 左右の補聴器をペアリング許可

※補聴器の形状を問わずアプリ画面は耳かけ型補聴器の画像です。

6 両耳ペアリング完了

⑦ 各種設定に進みます。



7 ストリーミング接続完了



ハンズフリー通話を希望しない場合は接続完了後、機器>ストリーミング設定「Bluetoothストリーミング」をオフへ設定します。

8 接続管理の設定

常時接続に設定することでスピーディーに音声を操作したり、補聴器の充電残量を確認することができます。

9 『補聴器を探す』の設定

ルミティシリーズ以降の補聴器は「有効にする」に設定することで補聴器の位置を検索することができます。

10 ペアリング確認

左右別々に表示され「接続済み」になっているか確認します。

TargetにてBluetooth名称を変更できます(未入力の場合、「右-Phonak補聴器」)

【接続解除】

アプリで補聴器の接続解除を実行した場合でも、ストリーミングはできるようにBluetooth受信側の接続は継続されますので必要に応じて解除してください。

