

フォナック ターゲット 簡単6ステップ

PHONAK
life is on

アイコンを
右に向かって進むだけ!



接 続



保存して終了



1: 顧客情報の入力

【新規顧客】をクリックして
「フリガナ」と「名前」を入力したら
【新しいセッション】をクリック!

フリガナ フォナックタロウ

名前 フォナック太郎

新しいセッション



2: オーディオグラフの入力

入力後【接続】をクリック! 次のステップへ。




接 続

接 続

3: 補聴器の接続

補聴器を選択したら【続行】をクリック!
多機能ボタンを押した補聴器が
ハイライトされます。

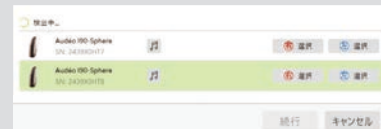

4: 音響パラメータ

最適な耳せんが自動選択されます。
実際に使用している「レシーバ」「耳せん」を
確認し、異なる場合は変更し、をクリック!

カプリングコード XXXXXXX

耳せん ベント付きイージーガード

耳せん サイズ S

レシーバ/AV M

ワイヤーの長さ OMR



5: ハウリングと実耳テスト

お客様に補聴器を装着していただいて実施。

両耳で測定を開始



保存して終了

6: 基本調整

全体的に利得が一律に増減するのではなく、
聴力に合わせて音の特性が変化します。
利得レベルを80~100%で調整し、調整が
終わったら画面右上【保存して終了】をクリック!



保存して終了

※フォナック ターゲット ver.11.1 を使用