



フォナックアプリ

『my補聴器を探す』機能について



● 『my補聴器を探す』機能とは

- スマートフォンの位置情報機能を活用し、
最後に補聴器とスマートフォンが接続された位置を検索することができる機能です。
(世界大半の国に対応)
リアルタイムでの所在がわかる機能ではありません。



- 『my補聴器を探す』機能は紛失した補聴器を補償するものではありませんのでご注意ください。

● 対応する補聴器 (詳しくは各アプリをご確認ください)

※ファームウェアが最新版にアップデートされていればマイフォナック 7.1 以降で利用可能です。

- マイフォナック アプリ
オーディオ インフィニオ、バート I-R、ルミティ、テラ+
- マイフォナック ジュニア アプリ
オーディオ インフィニオ、ナイーダ ルミティ、スカイルミティ、オーディオ ルミティ、クロス ルミティ

● アプリの使用準備と注意



- マイフォナック アプリと補聴器を Bluetooth® 接続します。Bluetooth® ペ어링については『フォナックきこえのブログ』をご確認ください。
- マイフォナック アプリの位置情報サービスは『常に許可』に設定いただく必要があります。スマートフォンから不定期に位置情報の確認通知が表示されることがありますが、探す機能を使用する場合『常に許可』に設定してください。
- スマートフォンの OS アップデートやスマートフォン誤操作により位置情報設定が変わってしまう場合があります。定期的にアプリを開き、Bluetooth 接続の確認や補聴器の位置を確認していただくことをおすすめします。
- アプリはマルチタスクにて起動したままにしてください。

きこえのブログ





補聴器の位置情報を検索



● マイフォナック アプリ

広域の位置情報

機器>補聴器の位置を確認>補聴器を探す
※アプリ内で検索可能です。

詳細な位置情報

補聴器との距離が近づく、ゲージの数が増えます



● マイフォナック ジュニア アプリ

広域の位置情報

自分の補聴器>my 補聴器を探す>位置情報を經由>表示するアプリを選択
※選択した地図アプリで表示されます。

詳細な位置情報

補聴器との距離が近づく、円の色が赤色に変化します。

遠 ● < ● < ● 近

