

フォナック補聴器のBluetooth®機能を無効にする方法

Bluetooth®機能の使用について

一部の医療施設や飛行機内、受験会場などでは、安全上または施設・試験運営上の理由により、Bluetooth®の使用が制限されることがあります。

そのような場所では、補聴器などBluetooth®機能を搭載した機器についても、その機能を無効にすることが求められる場合があります。

Bluetooth®機能の無効化

現在販売中のフォナック補聴器の多くにはBluetooth®機能が搭載されています。飛行機に搭乗する際の「機内モード」を使用することで、補聴器としての機能はそのまま、ワイヤレス機能のみ無効にすることができます。

● 機内モードで無効となる機能・周辺機器

- Bluetooth®通信
- ロジャー
- 左右の両耳間通信（CROS補聴システムを含む）
- フォナック パートナーマイク
- フォナック リモートコントロール
- テレビコネクターD



● 対象器種

- フォナック オーデオ（I/L/P/M） 全器種
- フォナック ナイターダ（L/P/M） 全器種
- フォナック スカイ（L/M） 全器種
- フォナック テラ/テラ+
- フォナック バート I-R
- フォナック バート P-312

補聴器を使用して受験・試験を受ける場合、事前の補聴器使用申請や医師の診断書などが必要となる場合があります。使用する補聴器が試験会場で使用可能か、またBluetooth機能を無効化した状態で受験が可能かについては、必ず事前に試験の実施団体へご確認ください。

機内モードの設定方法


機内モードの設定方法はお持ちの補聴器により異なります。

詳しくは器種ごとの取扱説明書をご確認ください。

充電式 耳かけ型


① 多機能ボタンの下部を3秒間長押し、補聴器の電源をオフにします。

② 多機能ボタンの下部を、LEDランプがオレンジ色に点灯するまで長押しします。途中、電源がオンになりLEDランプが緑色に点滅しますが、そのまま押し続けてください。

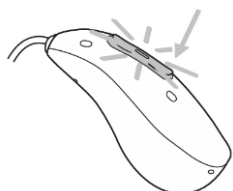


電池式 耳かけ型

① 電池ホルダーを開けます。

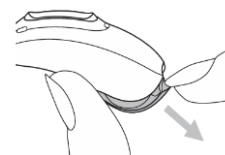

② 電池ホルダーを閉めながら、同時に多機能ボタンの下部を7秒間押し続けます。機内モードになると携帯電話との接続は切断されます。

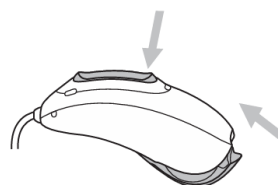

充電式 耳あな型

① プログラムスイッチを4秒間押し続けます。LEDランプが赤色に1回点滅して補聴器の電源がオフになるまで待ちます。



短く1回赤色点滅

② プログラムスイッチをLEDランプがオレンジ色に点灯するまで長押しします（約10秒）。途中、電源がオンになりLEDランプが緑色に点滅しますが、そのまま押し続けてください。。




電池式 耳あな型

① 電池ホルダーを開けます。



② 電池ホルダーを閉めながら、同時にプログラムスイッチを7秒間押し続けます。機内モードになると携帯電話との接続は切断されます。

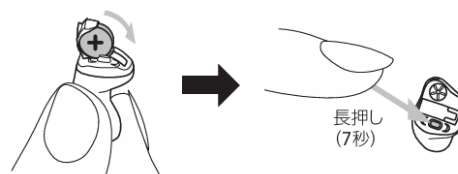

● 機内モードの終了

機内モードの終了は補聴器の電源を入れ直します。

取扱説明書

